

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŁAWECZKA POD PRYSZNIC SOPHIA 854

Nr katalogowy:	RF-854
Max. bezpieczne obciążenie:	113 kg
Regulacja wysokości:	40-55 cm
Szerokość siedziska:	49,5 cm
Głębokość siedziska:	30 cm
Waga ławeczki:	4,8 kg


UWAGA!

Przed rozpoczęciem korzystania z ławeczki należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

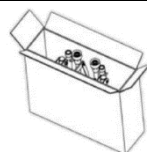
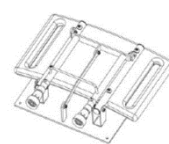
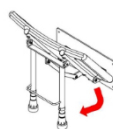

PRZEZNACZENIE

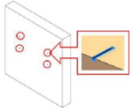
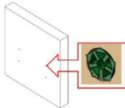
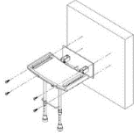
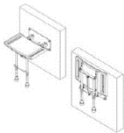
Ławeczka pod prysznic zapewnia stabilne siedzisko podczas kąpieli pod prysznicem. Pomaga w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych. Pomaga usiąść w czasie kąpieli pod prysznicem. Przeznaczona jest dla osób starszych oraz osób o ograniczonej możliwości ruchowej (czasowej lub trwałej) spowodowanej, np. wylewem, udarem, wypadkiem komunikacyjnym, łamliwością kości, urazami kończyn, bioder, operacją.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Ławeczki nie można użytkować pod prysznicem, gdy:
 - na nogach ławeczki nie są założone gumowe nasadki lub gdy nasadki są zużyte;
 - nogi nie są odpowiednio uregulowane;
 - nogi ławeczki nie są wyprostowane;
 - nogi ławeczki nie opierają się stabilnie o podłogę;
 - nogi ławeczki nie wspierają odpowiednio siedziska;
 - ławeczka nie jest przymocowana do ściany.
- Zużyta gumową nasadkę należy wymienić na nową. Kontrolę nasadki użytkownik obowiązany jest dokonywać we własnym zakresie, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
- Nie przekraczać maksymalnego obciążenia ławeczki.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

MONTAŻ

1. Otwórz karton.	2. Zamontuj dolną część rury w ramę i przymocuj za pomocą połączenia zatrzaskowego.
	
3. Rozłóż ławeczkę.	4. Umieść ławkę prysznicową blisko ściany, wyreguluj nóżki do odpowiedniej wysokości siedziska, zaznacz punkt na ścianie przez cztery otwory do montażu.
	

5. Przesuń ławkę prysznicową, wywierć cztery otwory zgodnie z oznaczeniem o średnicy 6mm, 35mm głębokość.	6. Włóż plastikową osłonkę w otwory.
	
7. Ustaw ławkę prysznicową przy ścianie. Zamontuj ławkę za pomocą śrub.	8. Sprawdź, czy ławeczka jest dobrze zamontowana.
	



UWAGA! Zawsze przed użyciem ławeczki upewnij się, że jest ona prawidłowo i stabilnie zamontowana do ściany.

REGULACJA WYSOKOŚCI

Regulacja wysokości znajduje się na nogach ławeczki:

- Zdejmij zapinkę;
- Wewnętrzną rurkę dolną wysuń, uzyskując potrzebną wysokość;
- Ustaw otwory rurek zewnętrznej i wewnętrznej tak, aby dokładnie nakładały się na siebie;
- Załóż zapinkę;
- Upewnij się, że dokonana regulacja została wykonana poprawnie, a noga stoi stabilnie na podłożu.



UWAGA! Należy dokładnie sprawdzić czy zapinka jest prawidłowo zablokowana w otworach.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę ławeczki pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.
2. Zaleca się regularne czyszczenie. Ławkę należy czyścić miękką szmatką oraz wodą z mydłem.












UWAGA! Do czyszczenia ławeczki nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

rama	stal
nasadki	guma
siedzisko	PE (polietylen)

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania

	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.3
Wydano: 09/2021

NOTATKI

**KARTA GWARANCYJNA
ŁAWECZKA POD PRYSZNIC SOPHIA 854**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęćka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Ławeczka jest objęta 24-miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że ławeczka była wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją ławeczki opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia ławeczki np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszka uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH *(wypełnia serwis)*

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					