

# INSTRUKCJA UŻYWANIA

Materac przeciwoleżynowy BioFlote 700



## PRZEZNACZENIE

Materac przeciwoleżynowy o płaskim profilu, zalecany do profilaktyki powstawania odleżyn I stopnia.

## CHARAKTERYSTYKA

Materac jest wykonany z nietoksycznej, pianki poliuretanowej. Wymiary: 200 x 90 x 7 cm lub 200 x 90 x 10 cm.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyścić delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnych środków do prania. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć. UWAGA! Nie zamaczać całej pianki w wodzie.

## PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą.

Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry.

Nie stosować, jeśli nastąpiło uszkodzenie mechaniczne wyrobu (np. pęknięcie, rozerwanie). Nie stosować inaczej niż zgodnie z przeznaczeniem.

## ⚠️ OSTRZEŻENIA

Przed użyciem należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania.

Przed pierwszym użyciem należy wyprać pokrowiec.

Wyrób należy dobrać odpowiednio do rozmiaru ciała.

Nie wystawiać produktu na działanie otwartego płomienia lub innych źródeł ognia mogących wywołać zapłon.

Pianka wystawiona na działanie otwartego ognia gwałtownie się zapala.

Nie wystawiać produktu na długotrwałe działanie niskich temperatur (poniżej 5 °C).

Opakowanie produktu nie jest zabawką.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

## UWAGA

Nie wystawiać produktu na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ pod wpływem nasłonecznienia może ulec przebarwieniu. Przebarwienie pianki nie wpływa na jej właściwości fizyczno-mechaniczne produktu.

## GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.

Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).

Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

## Glosariusz symboli

Producent	Data produkcji	Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone	Chronić przed wilgocią	Nie wybielać
Numer katalogowy	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	Przechowywać z dala od światła słonecznego	Prać na sucho bez użycia rozpuszczalników	Suszyć w pozycji poziomej
Zajrzyj do instrukcji używania	Ilość	Najniższa dopuszczalna temperatura	Prasować w temperaturze maksymalnie 150 °C	Nie prać w suszarce bębnowej
Kod partii	Oznakowanie CE	Prać w temperaturze max 60°C	Nie prasować	Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze
Wyrób medyczny	Ostrzeżenie	Prać w temperaturze max 90°C	Odporność na suszenie 70°C	
# symbol"/> Numer modelu	Dbaj o czystość	Prać w temperaturze max 95°C	Nie czyścić chemicznie	

Data wydania instrukcji używania: 10.2024 v.2

15/P/EN

15/P/B

15/P/N

15/P/BEN

**REHA FUND Sp. z o.o.**  
ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa, Polska  
www.rehafund.pl