

INSTRUKCJA UŻYWANIA ORTEZA STAWU KOLANOWEGO OTWARTA DŁUGA „STABILMAX OPEN LONG” O-1243

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim. Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu. Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.



II. CHARAKTERYSTYKA TABELA ROZMIARÓW

Rozmiar	Obwód kolana
S	30–34 cm
M	34,5–38 cm
L	38,4–42 cm
XL	42,5–46 cm
XXL	46,5–50 cm
3XL	50,5–54 cm
4XL	54,5–58 cm

SKŁAD

Poliester 40%
Aluminium 30%
Polipropylen 20%
Nylon 10%

Orteza odciąża i stabilizuje kończynę dolną. Wykonana jest z kompresyjnej i ogrzewającej tkaniny. Posiada otwartą konstrukcję zapinaną z tyłu na rzep oraz wbudowany około rzepkowy pierścień silikonowy. Wbudowany mechanizm umożliwia szybkie blokowanie ortozy w żądanym kącie. Pasuje na prawą i lewą nogę. Anatomiczny kształt ortozy i szeroki zakres rozmiarowy pozwala na idealne dopasowanie wyrobu do ciała pacjenta.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Orteza stawu kolanowego otwarta długa „STABILMAX OPEN LONG” przeznaczony jest dla pacjentów, którzy potrzebują zapewnienia odpowiedniego podparcia i stabilizacji boczno-przyśrodkowej stawu kolanowego. Używana w trakcie rehabilitacji pourazowej, doleczenia pooperacyjnego oraz w jednostkach chorobowych wymagających kontroli zakresu ruchów w stawie.

Produkt może być używany w przypadku:

- Zwichnięć stawu kolanowego
- Skręceń stawu kolanowego
- Niestabilności bocznej kolana
- Rehabilitacji pourazowej
- Doleczania pooperacyjnego
- Profilaktyki w sporcie

IV. PRZECIWWSKAZANIA

Istniejące problemy z drenażem limfy,

Zbyt ciasne założenie ortozy może prowadzić do nasilenia dolegliwości bólowych, zbyt luźne powoduje brak założonego działania,

W przypadku wystąpienia zmian na skórze w miejscach przylegania ortozy, jej stosowanie jest ograniczone możliwe tylko pod nadzorem lekarza,

Konieczna jest ocena przez lekarza prowadzącego zastosowania ortozy w przypadku osób z zaburzeniami pamięci różnego pochodzenia, osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Ten produkt może być używany tylko zgodnie z zaleceniem lekarza.

Sposób zakładania ortozy powinien być zademonstrowany przez wykwalifikowany personel medyczny, w obecności osoby, która sprawuje opiekę nad użytkownikiem (jeśli dotyczy).

Produkt i jego elementy należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Jeśli podczas użytkowania produktu wystąpi ból, obrzęk, zmiany czucia lub jakiegolwiek nietypowe reakcje, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Stosowanie produktu w nocy jest dopuszczalne jedynie w przypadku zalecenia lekarza prowadzącego.

Stosowanie ortozy przez długi okres czasu może skutkować ograniczeniem ruchów czynnych i biernych w stawach oraz zanikiem mięśni, dlatego zaleca się systematyczne wykonywanie ćwiczeń dobranych przez wykwalifikowany personel medyczny na polecenie lekarza prowadzącego.

Produkt należy utrzymywać w czystości zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji oraz na metce umieszczonej na wyrobie. Niewłaściwe czyszczenie i konserwacja wyrobu może prowadzić do powstawania zmian skórnych.

Produkt nie może być używany w przypadku braku jakiegokolwiek części. Nie można stosować dwóch tych samych lub różnych produktów jednocześnie.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

VI. SPOSÓB UŻYCIA

Upewnij się, że rozmiar produktu jest odpowiednio dobrany.

Rozepnij wszystkie taśmy i zapięcia na rzep,

Przyłóż ortezę do nogi w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzępkowym, a zegary szyn znajdowały się w osi stawu kolanowego,

Zapnij ortezę z tyłu na rzepy.

Przepleć taśmy przez klamry i zapnij na rzepy.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się pranie wyrobu regularnie. Przed praniem należy zapiąć wszystkie połączenia rzepowe ortozy.

- Prać ręcznie w wodzie z neutralnym, antyalergicznym detergentem,
- Płukać w letniej wodzie, nie stosować środków zmiękczających,
- Nie wybielać,
- Nie prasować,
- Nie czyścić chemicznie,
- Nie suszyć w suszarce bębnowej,
- Suszyć na płasko w zacienionym oraz przewiewnym miejscu – nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli ortozy, zgodnie z zaleceniami producenta. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZANY OKRES UŻYWANIA

Przewidzany okres używania ortozy to 3 lata. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

X. GWARANCJA:

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.

Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).

Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Góra, nie przewracać
	Oznakowanie CE		Chronić przed wilgocią
	Numer katalogowy		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Data produkcji		Nie przecinać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Recykling
	Ostrzeżenie		Prać ręcznie
	Kod partii		Nie wybielać
	Wyrób medyczny		Nie prasować
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Nie czyścić chemicznie
	Ilość		Nie suszyć bębnowo
	Numer modelu		

