

# KARTA GWARANCYJNA

OKRĄGŁY TABORET POD PRYSZNIC CAMERON 822

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

## WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Wyrób jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady wyrobu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że wyrób był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
  - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji używania;
  - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
  - mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
  - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją używania, zaniedbania,
7. Przed oddaniem wyrobu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją używania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku niezasadzonego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

## WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					



PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO  
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, www.rehafund.pl

## INSTRUKCJA UŻYWANIA

OKRĄGŁY TABORET POD PRYSZNIC CAMERON 822  
WYRÓB MEDYCZNY

### MODELE

Nr katalogowy	<b>RF-822</b>	<b>RF-822</b>
Numer SKU	RF-822/N	RF-822/B
Max. bezpieczne obciążenie	136 kg	136 kg
Waga taboretu:	2,5 kg	2,5 kg
Regulacja wysokości siedziska	40-57,5 cm	40-57,5 cm
Średnica siedziska	32cm	32cm
Kolor siedziska	niebieski	biały



Przed rozpoczęciem korzystania z taboretu, należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

### PRZEZNACZENIE

Taboret pod prysznic pozwala osobom z ograniczoną sprawnością ruchową utrzymać codzienną higienę osobistą zachowując przy tym znaczną samodzielność. Dzięki temu sprzętowi zagrożenie upadkiem czy innym urazem, które możliwe są pod prysznicem, znacznie spada.

### ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:


1. Przed korzystaniem z taboretu upewnić się, że:
  - a. wysokość siedziska jest odpowiednio wyregulowana;
  - b. przyciski blokujące działają poprawnie;
  - c. gumowe nasadki są w dobrym stanie;
  - d. wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.
2. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie taboretu w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
3. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia taboretu.
4. Nie przechować w temperaturze poniżej 0°C.
5. Przed użyciem upewnij się, że rurki stóp ustawione są na tej samej wysokości.
6. Nie próbuj przesuwając taboretu w górę lub w dół po pochyłości za pomocą wody, lodu lub oleju.
7. Taboret musi być stosowany na płaskiej powierzchni.
8. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

### REGULACJA WYSOKOŚCI

1. Wciśnij przycisk zabezpieczający na stopce taboretu i obróć ją delikatnie, jak na rysunku obok.
2. Ustaw odpowiednią wysokość.
3. Naceluj przyciskiem na odpowiedni otwór, dzięki czemu zablokujesz stopkę na żądanej wysokości.
4. Powtórz powyższe czynności na każdej stopce upewniając się, że wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.

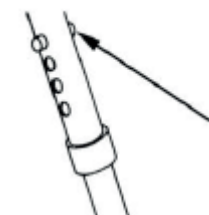

 **Upewnij się, że wszystkie stopki są poprawnie zablokowane i wyregulowane na tą samą wysokość.**

#### SIADANIE I WSTAWANIE

1. Upewnij się, że taboret stoi stabilnie i jest gotowy do użycia.
2. Stań tyłem do taboretu tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.
3. Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na siedzisku.
4. Powoli siadaj na taborecie, zginając łokcie i, jeśli jest to możliwe, kolana oraz biodra.
5. Aby wstać z krzesła, oprzyj dłonie na siedzisku i podnieś się.

#### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę taboretu pod kątem wszelkich uszkodzeń i widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
  - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
  - przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość;
  - otwory w rurkach nie są powiększone lub wydłużone;
  - dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić;
  - żadne inne części krzesła prysznicowego nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie taboretu miękką szmatką i wodą z mydłem. Taboret po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką

 **Do czyszczenia taboretu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.**


#### ELEMENTY TABOTETY



Powyższe zdjęcie ma charakter poglądowy.

#### SPOSÓB MONTAŻU

1. Połóż oparcie na twardej powierzchni płaską powierzchnią w dół (A). Obróć również jedną z górnych struktur nóg (B) i wyrównaj otwory na śruby z otworami siedziska (A).
2. Umieść drugą górną strukturę nóg (B) na górze przedniej w formie krzyża i wyrównaj otwory na śruby z otworami siedziska (A).
3. Umieść metalowe podkładki (C) na śrubach mocujących (D), wkładając je do otworów nóg i siedzenia (A). Obracaj śruby do momentu blokady.
4. Na końcach krzyżaka umieść spody nóg (E). Upewnij się że blokada każdej nogi została odpowiednio zabezpieczona.
5. Ustaw siedzenie prysznicowe we właściwej pozycji. Instalacja została zakończona.

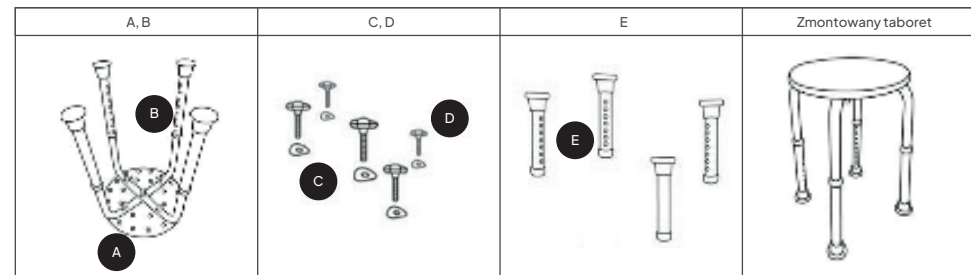

#### LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Siedzisko	PP (polipropylen)
Nasadka	guma
Śruba	stal nierdzewna

#### WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
	Wyrób medyczny		Kruchy, obchodzić się ostrożnie

 **REHA FUND Sp. z o.o.**  
ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa, Polska  
www.rehafund.pl



I/PL/RF-822/2/18.04.2024  
Data wydania instrukcji używania 18.04.2024 v.2