

# INSTRUKCJA UŻYWANIA

Krażek przeciwoślezykowy Kari



## PRZEZNACZENIE

Krażek przeciwoślezykowy piankowy w pokrowcu z dzianiny frotte zapewnia odpowiednią stabilizację i redukcję nacisku podłoża na tkanki miękkie łokci, pięt, głowy i kości ogonowej.

## CHARAKTERYSTYKA

Krażek wykonany z pianki poliuretanowej. Pokrowiec na krażek wykonany z dzianiny frotte o wysokiej zawartości bawełny, zapinany na rzep.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Pokrowiec prać w temperaturze do 40°C. Piankę czyścić delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnych środków do prania. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć. Nie namaczać całej pianki w wodzie.

### PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą.

Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry.

Nie stosować, jeśli nastąpiło uszkodzenie mechaniczne wyrobu (np. pęknięcie, rozerwanie).

## OSTRZEŻENIA

Przed użyciem skonsultować celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania z lekarzem lub specjalistą rehabilitantem.

Przed pierwszym zastosowaniem należy uprać pokrowiec, w którym znajduje się poduszka.

Wyrób należy dobrać odpowiednio do rozmiaru ciała.

Nie wystawiać produktu na działanie otwartego płomienia lub innych źródeł ognia mogących wywołać zapłon.

Pianka wystawiona na działanie otwartego ognia gwałtownie się zapala.

Nie wystawiać produktu na długotrwałe działanie niskich temperatur (poniżej 5 °C).

Opakowanie produktu nie jest zabawką.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

## UWAGA

Nie wystawiać produktu na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ pod wpływem nasłonecznienia może ulec przebarwieniu. Przebarwienie pianki nie wpływa na jej właściwości fizyczno-mechaniczne produktu.

## GWARANCJA

Producent zapewnia klientowi, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.

Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).

Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

## Glosariusz symboli

 Producent	 Data produkcji	 Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone	 Nie wybielać
 Numer katalogowy	 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	 Ostrzeżenie	 Nie suszyć bębnowo
 Zajrzyj do instrukcji używania	 Ilość	 Chronić przed wilgocią	 Prasować w temperaturze maksymalnie 150 °C
 Kod partii	 Oznakowanie CE	 Dbaj o czystość	 Prać w temperaturze max 40°C
 Wyrób medyczny	 Numer modelu	 Przechowywać z dala od światła słonecznego	

Data wydania instrukcji używania: 01.2025 v. 2



 **REHA FUND Sp. z o.o.**  
ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa, Polska (Poland)  
e-mail: info@rehafund.pl  
www.rehafund.pl

I/AD-3/2/01.2025