

## IX. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ilość
	Oznakowanie CE		Chronić przed wilgocią
	Numer katalogowy		Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Numer modelu		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Data produkcji		Najniższa dopuszczalna temperatura
	Zajrzyj do instrukcji używania		Dbaj o czystość
	Wyrób medyczny		Opakowanie nadaje się do recyklingu
	Ostrzeżenie		Nie prać
	Kod partii		Nie wybielać
	Góra, nie przewracać		Nie prasować
	Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone		Nie czyścić chemicznie
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Suszyć rozłożone w cieniu



PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO  
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, www.rehafund.pl

## INSTRUKCJA UŻYWANIA

### PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH MORFEUSZ

#### I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,  
Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.


Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.

**UWAGA!** Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

#### II. CHARAKTERYSTYKA

### MORFEUSZ 660 660/F

KLASYCZNY

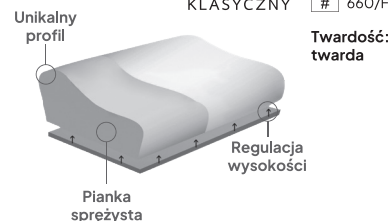


#### STABILIZACJA

Idealnie dopasowuje się do kształtu szyi i ramion zapewniając ich stabilne podparcie. Sprężysta pianka zapewni dobre podparcie kręgosłupa.

**Wymiary:** 48 cm x 30 cm x 11/14 cm

### MORFEUSZ 661 661/F

KOMFORTOWY

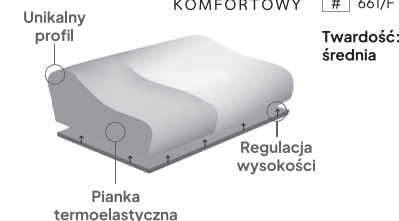


#### WYSOKI KOMFORT

Idealnie dopasowuje się do kształtu szyi i ramion zapewniając ich stabilne podparcie. Pianka termoelastyczna ("z pamięcią") zapewnia wysoki komfort i odpowiednią pozycję w czasie snu.

**Wymiary:** 48 cm x 30 cm x 11/14 cm

### MORFEUSZ 662 662/F

EKSKLUZYWNY

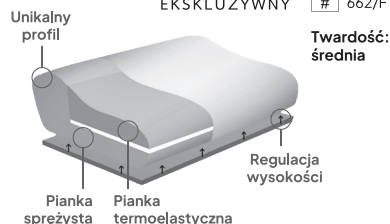

#### WYSOKI KOMFORT I STABILIZACJA

Idealnie dopasowuje się do kształtu szyi i ramion zapewniając ich stabilne podparcie. Dwie warstwy pianki zapewniają wyjątkowy komfort, a jednocześnie dobre podparcie odcinka kręgosłupa szyjnego.

**Wymiary:** 46 cm x 30 cm x 10/13 cm

### MORFEUSZ 663 663/F

PODRÓŻNY



#### ZAWSZE Z TOBĄ

Idealnie dopasowuje się do kształtu szyi i ramion zapewniając ich stabilne podparcie. Pianka termoelastyczna ("z pamięcią") zapewnia wysoki komfort i odpowiednią pozycję w czasie snu. Dla osób podróżujących, ceniących wysoki komfort snu podczas wyjazdów.

**Wymiary:** 30 cm x 25 cm x 10/14 cm




## MORFEUSZ

REF 664

DELIKATNY

# 664/F

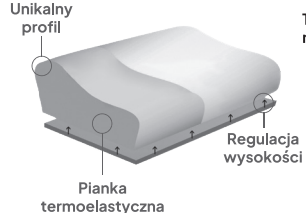

Twardość: miękka

### WYSOKI KOMFORT I DELIKATNOŚĆ

Idealnie dopasowuje się do kształtu szyi i ramion zapewniając ich stabilne podparcie. Pianka termoelastyczna ("z pamięcią") zapewnia wysoki komfort i odpowiednią pozycję w czasie snu.

Wymiary: 48 cm x 32,5 cm x 10/13 cm

## MORFEUSZ

REF 665

DO TERAPII BEZDECHU SENNEGO



Twardość: miękka

### WYSOKI KOMFORT + STABILIZACJA MASKI

Poduszka, która przeciwdziała przesuwaniu się maski, daje poczucie wysokiego komfortu oraz stabilizuje pozycję głowy w trakcie snu.

Wymiary: 55 cm x 36 cm x 11/14 cm

### Dane techniczne pianek:

Wkład piankowy	100% pianka poliuretanowa
Poszewka	100% bawełna

Wszystkie poduszki z serii Morfeusz posiadają regulację wysokości. Dzięki wyjmowanej dolnej części poduszki istnieje możliwość indywidualnego dopasowania jej do budowy ciała.

### III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Poduszki ortopedyczne z serii Morfeusz przeznaczone są dla osób mających problemy wynikające z nieprawidłowej pozycji szyi i głowy podczas snu (np. bóle kręgosłupa, napięcia mięśniowe, mrowienie i drętwienie kończyn itp.), potrzebujących stabilnego podparcia głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa w trakcie snu, przy jednoczesnej redukcji nacisku na ciało.

#### Morfeusz Klasyczny

Poduszka przeznaczona do stosowania w celu profilaktyki i zapobiegania zwyrodnieniu i bólom odcinka szyjnego kręgosłupa spowodowanego nieprawidłową pozycją w trakcie snu, dla mających problemy wynikające z nieprawidłowej pozycji szyi i głowy podczas snu. Dla każdej budowy ciała i wzrostu, dla śpiących na wznak i na boku.

#### Morfeusz Komfortowy

Poduszka przeznaczona do stosowania w celu profilaktyki i zapobiegania zwyrodnieniu i bólom odcinka szyjnego kręgosłupa spowodowanego nieprawidłową pozycją w trakcie snu, dla ceniących profilaktykę zdrowego snu, mających problemy wynikające z nieprawidłowej pozycji szyi i głowy podczas snu potrzebujących stabilnego podparcia głowy i odcinka i mających delikatną skórę oraz naczynia krwionośne. Dla każdej budowy ciała i wzrostu, dla śpiących na plecach, jak i na boku.

#### Morfeusz Ekskluzywny

Poduszka przeznaczona do stosowania w celu profilaktyki i zapobiegania zwyrodnieniu i bólom odcinka szyjnego kręgosłupa spowodowanego nieprawidłową pozycją w trakcie snu, dla ceniących profilaktykę zdrowego snu, mających problemy wynikające z nieprawidłowej pozycji szyi i głowy podczas snu, dla osób śpiących na boku.

#### Morfeusz Podróżny

Poduszka przeznaczona do stosowania w celu profilaktyki i zapobiegania zwyrodnieniu i bólom odcinka szyjnego kręgosłupa spowodowanego nieprawidłową pozycją w trakcie snu, dla osób często śpiących poza domem, mających problemy wynikające z nieprawidłowej pozycji szyi i głowy podczas snu i mających delikatną skórę oraz naczynia krwionośne, dla każdej budowy ciała i wzrostu, dla śpiących na wznak i na boku. Do stosowania stacjonarnie w obiektach wypoczynkowych.

#### Morfeusz Delikatny

Poduszka przeznaczona do stosowania w celu profilaktyki i zapobiegania zwyrodnieniu i bólom odcinka szyjnego kręgosłupa spowodowanego nieprawidłową pozycją w trakcie snu, dla mających problemy wynikające z nieprawidłowej pozycji szyi i głowy podczas snu, potrzebujących stabilnego podparcia głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa w trakcie snu, przy jednoczesnej redukcji nacisku na ciało, dla każdej budowy ciała i wzrostu, dla śpiących na wznak i na boku.

### Morfeusz do terapii bezdechu sennego

Poduszka przeznaczona jest to do stosowania w celu profilaktyki i zapobiegania zwyrodnieniu i bólom odcinka szyjnego kręgosłupa spowodowanego nieprawidłową pozycją w trakcie snu, oraz jednoczesnego zapobiegania zsuwaniu się maski dla osób korzystających z urządzeń CPAP, dla cierpiących na bezdech senny, mających problemy wynikające z nieprawidłowej pozycji szyi i głowy podczas snu, potrzebujących stabilnego podparcia głowy i dobrego podparcia odcinka szyjnego kręgosłupa w trakcie snu przy jednoczesnej redukcji nacisku na ciało, wymagających wrażenia niezwyklej miękkości i bardzo wysokiego komfortu snu na poduszce dostosowującej się do kształtu głowy, dla każdej budowy ciała i wzrostu, dla śpiących na wznak lub na boku.

### IV. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego produktu bezpośrednio w kontakcie ze skórą.

Nie stosować w przypadku reakcji alergicznych skóry.

Nie stosować, jeżeli nastąpiło mechaniczne uszkodzenie (np. rozerwanie, pęknięcie).

Nie stosować inaczej niż zgodnie z przeznaczeniem.

### V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą rehabilitantem odnośnie braku przeciwwskazań do używania produktu.

Wyrób należy dopasować do rozmiaru ciała korzystając lub też nie z podkładki regulującej wysokość.

Nie wystawiać produktu na działanie otwartego płomienia lub innych źródeł ognia mogących wywołać zapłon. Pianka wystawiona na działanie otwartego ognia gwałtownie się zapala.

Przechowuj piankę w miejscu, gdzie nie jest narażona na działanie promieni UV, ponieważ słońce może powodować uszkodzenia materiału.

Piankę najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej, unikając skrajnych temperatur (poniżej 5°C i powyżej 55°C). Zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury mogą wpłynąć na jej strukturę. Zalecana temperatura przechowywania 20-25°C.

Utrzymuj niską wilgotność, ponieważ wilgotne środowisko może prowadzić do rozwoju pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.

Unikaj zgniatania pianki, gdyż może to wpłynąć na jej właściwości. Jeśli to możliwe, przechowuj ją w pozycji leżącej.

Regularnie sprawdzaj piankę pod kątem zanieczyszczeń lub plam. W razie potrzeby możesz przetrzeć ją wilgotną gąbką. Nie używaj silnych detergentów ani środków chemicznych.

Opakowanie wyrobu nie jest zabawką.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

### VI. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Poduszki ortopedyczne jako wyroby z pianki poliuretanowej są wyrobami niesterylnymi, przeznaczonymi do wielokrotnego użycia, które wymagają czyszczenia przed użyciem przez użytkownika. Czyścić delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnych środków do prania. Aby prawidłowo zdjąć poszewkę, należy najpierw rozsunąć suwak, następnie zgiąć piankę w pół po długości i delikatnie ściągnąć poszewkę. Poszewkę prać i czyścić zgodnie z informacją na metce. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć.

### VII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli poduszki zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

### VIII. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).

Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.