

INSTRUKCJA UŻYWANIA TABORET DO HIGIENY OSOBISTEJ WILSON 811

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.
Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.



UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA

PARAMETRY TECHNICZNE

Nr katalogowy.: **RF-811**
Całkowita szerokość: 48,5 cm
Szerokość siedziska: 48,5 cm
Całkowita wysokość: 41-51cm
Całkowita długość: 41 cm
Wysokość siedziska: 39 - 49cm
Głębokość siedziska: 33,5 cm
Max. bezpieczne obciążenie: 110 kg
Waga: 2 kg

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Siedzisko	PE (polietylen)
Nasadka	TPR (guma termoplastyczna)
Przycisk blokujący	stal

ELEMENTY TABORETU

Elementy taboretu przedstawione są na rys. nr 1



Powyższe zdjęcie ma charakter poglądowy.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Taboret pozwala osobom z ograniczoną sprawnością ruchową, osobom po operacjach, seniorom utrzymać codzienną higienę osobistą zachowując przy tym znaczną samodzielność. Specjalne wycięcie umożliwia również dbanie o higienę miejsc intymnych. Dzięki temu sprzętowi zagrożenie upadkiem czy innym urazem, które możliwe są pod prysznicem, znacznie spada.

IV. PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiający siadanie na taborecie, urazy kończyn dolnych uniemożliwiający utrzymanie równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZENEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed korzystaniem z taboretu upewnij się, że:
 - a. wysokość siedziska jest odpowiednio wyregulowana;
 - b. przyciski blokujące działają poprawnie;
 - c. gumowe nasadki są w dobrym stanie;
 - d. wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.
2. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie taboretu w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
3. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia taboretu.
4. Nie przechować w temperaturze poniżej 0°C.
5. Przed użyciem upewnij się, że rurki stóp ustawione są na tej samej wysokości.
6. Nie próbuj przesuwac taboretu w górę lub w dół po pochyłości za pomocą wody, lodu lub oleju.
7. Taboret musi być stosowany na płaskiej powierzchni.
8. Przed każdym użyciem sprawdź stabilność krzesła oraz poziom dokręcenia śrub.
9. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.




UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

VI. SPOSÓB UŻYWANIA

REGULACJA WYSOKOŚCI

1. Wciśnij przycisk zabezpieczający na stopce taboretu i obróć go delikatnie.
2. Ustaw odpowiednią wysokość.
3. Naceluj przyciskiem na odpowiedni otwór, dzięki czemu zablokujesz stopkę na żądanej wysokości.
4. Powtórz powyższe czynności na każdej stopce upewniając się, że wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.

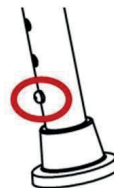

UWAGA! Upewnij się, że wszystkie stopki są poprawnie zablokowane i wyregulowane na tą samą wysokość.

SIADANIE I WSTAWANIE

1. Upewnij się, że taboret stoi stabilnie i jest gotowy do użycia.
2. Stań tyłem do taboretu tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.
3. Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na siedzisku.
4. Powoli siadaj na taborecie, zginając łokcie i jeśli jest to możliwe kolana oraz biodra.
5. Aby wstać z taboretu, oprzyj dłonie na siedzisku i podnieś się.

MONTAŻ

1. Przygotuj zestaw montażowy (rys. 1).
2. Skrzyżuj nogi taboretu (rys. 2).
3. Dopasuj je do siedziska od spodu (rys. 3).
4. Wkręć śrubę wraz z podkładką na środku siedziska. Nie dokręcaj jednak śruby do końca (rys. 4).
5. Teraz dokręć wszystkie śruby - wkręcaj po kolei każdą śrubę po trochu. Jeśli dokręcisz śruby wcześniej, możesz mieć problemy z montażem.



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę taboretu pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - a. na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
 - b. przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość;
 - c. otwory w rurkach nie są powiększone lub wydłużone;
 - d. dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić;
 - e. żadne inne części taboretu nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie taboretu miękką szmatką i wodą z mydłem.
3. Taboret po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.
4. Przed użyciem sprawdź szczelność śrub i stabilność taboretu.
5. Regularne czyszczenie zapobiegnie zabrudzeniu rurek i zapewni prawidłowe działanie taboretu.



UWAGA! Do czyszczenia taboretu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli taboretu zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZANY OKRES UŻYWANIA

Przewidziany okres używania taboretu to 5 lat. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrób..

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta). Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
	Wyrób medyczny		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		

