

# INSTRUKCJA UŻYWANIA

## Podkład higieniczny do opieki domowej



### PRZEZNACZENIE

Podkład higieniczny do opieki domowej jest wyrobem medycznym przeznaczonym do zabezpieczenia powierzchni (np. materaca, łóżka) przed zabrudzeniem wydzielinami fizjologicznymi (np. mocz, krew). Chroni przed wystąpieniem zakażeń/infekcji w wyniku długotrwałej styczności pacjenta z wydzielinami fizjologicznymi.

### CHARAKTERYSTYKA

Wykonany w 100% z poliestru. W opakowaniu znajduje się 1 sztuka produktu.

Podkłady dostępne w rozmiarach: 60x70 cm, 70x100 cm, 90x100 cm, 70x140 cm, 90x140 cm, 100x140 cm, 110x140 cm, 90x200 cm, 140x200 cm, 180x200 cm, 90x200 cm z gumką, 140x200 cm z gumką, 180x200 cm z gumką. Dostępne kolory: biały, niebieski, zielony.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Podkład higieniczny do opieki domowej wielokrotnego użycia można prać delikatnie w temperaturze do 60 °C.

Produkt zachowuje właściwości do ok. 30 prań środkami do prania. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć.

### PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą.

Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry.

Nie stosować, jeśli nastąpiło uszkodzenie mechaniczne wyrobu (np. pęknięcie, rozerwanie).

### ⚠️ OSTRZEŻENIA

Przed użyciem skonsultować celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania z lekarzem lub specjalistą rehabilitantem. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Przed pierwszym zastosowaniem należy uprać podkład.

Nie chlorować (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor).

Nie czyścić chemicznie.

Nie prasować (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer).

Stosować jednostronnie (podkład należy skierować powierzchnią działaniową do góry).

Nie stosować wybielaczy.

Nie stosować środków chemicznych.

Nie suszyć w suszarkach bębnowych.

Produkt nie może być używany po upływie 5 lat od daty produkcji.

Pogorszenie właściwości wizualno-estetycznych (typu zmarszczenie powierzchni) nie wpływa na zmianę parametrów użytkowych materiału (właściwości fizyko mechanicznych).

Opakowanie wyrobu nie jest zabawką.

### GWARANCJA

Wyrób objęty jest 24-miesięcznym okresem gwarancji. Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w skutek używania wyrobu niezgodnie z instrukcją używania, zaniedbań, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych. Do serwisu produktu należy dostarczyć czysty. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, nabywca będzie obciążony kosztami realizacji i reklamacji.

Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu. Zasięg terytorialny ochrony gwarancji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

### Wyjaśnienie symboli

Producent	Kod partii	Dbaj o czystość	Użyć do daty	Suszyć w pozycji poziomej
Numer katalogowy	Wyrób medyczny	Przechowywać z dala od światła słonecznego	Ostrzeżenie	Nie czyścić chemicznie
Zazirj do instrukcji używania	Oznakowanie CE	Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone	Prać w temperaturze max 60 °C	Nie wybielać
Data produkcji/Kraj pochodzenia wyrobu	Numer modelu	Chronić przed wilgocią	Nie prasować	Suszyć w suszarkach bębnowych

Data wydania instrukcji używania: 01.2024 v.5



**REHA FUND Sp. z o.o.**  
ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa, Polska  
www.rehafund.pl