

# INSTRUKCJA UŻYWANIA

## Podkładka ochronna pod łokieć Lima



### PRZEZNACZENIE

Podkładka ochronna piankowa zapewnia redukcję nacisku podłoża na tkanki miękkie w okolicach łokci.

### CHARAKTERYSTYKA

Podkładka wykonana jest z pianki poliuretanowej. W opakowaniu znajdują się 2 szt. wyrobu.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Piankę czyścić delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnych środków do prania. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć. Nie namaczać całej pianki w wodzie.

### PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą.

Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry.

Nie stosować, jeśli nastąpiło uszkodzenie mechaniczne wyrobu (np. pęknięcie, rozerwanie).

### OSTRZEŻENIA

Przed użyciem skonsultować celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania z lekarzem lub specjalistą rehabilitantem.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Nie wystawiać produktu na działanie otwartego płomienia lub innych źródeł ognia mogących wywołać zapłon. Pianka wystawiona na działanie otwartego ognia gwałtownie się zapala.

Nie wystawiać produktu na długotrwałe działanie niskich temperatur (poniżej 5 °C).

Opakowanie wyrobu nie jest zabawką.

### GWARANCJA

Wyrób objęty jest 24-miesięcznym okresem gwarancji. Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w skutek używania wyrobu niezgodnie z instrukcją używania, zaniedbań, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych. Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, nabywca będzie obciążony kosztami realizacji i reklamacji. Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu. Zasięg terytorialny ochrony gwarancji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

### Wyjaśnienie symboli

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|  Producent                      |  Kod partii     |  Oznakowanie CE                     |  Dbaj o czystość                            |  Chronić przed wilgocią                          |
|  Numer katalogowy               |  Wyrób medyczny |  Najniższa dopuszczalna temperatura |  Przechowywać z dala od światła słonecznego |  Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone |
|  Zajrzyj do instrukcji używania |  Data produkcji |  Ostrzeżenie                        |  |   |

Data wydania instrukcji używania: 02.2024 v.2



REHA FUND Sp. z o.o.  
ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa, Polska  
www.rehafund.pl

I/PL/AD-2/2/O6.02.2024