

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Podkładka ochronna pod piętę Ellen



PRZEZNACZENIE

Podkładka ochronna piankowa zapewnia redukcję nacisku podłoża na tkanki miękkie w okolicach pięty.

CHARAKTERYSTYKA

Podkładka wykonana jest z pianki poliuretanowej o wymiarach 16x19 cm.

Podkładka zapinana jest na rzep. W opakowaniu znajdują się 2 sztuki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Piankę czyścić delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem środków do prania. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć. Nie moczyc całej pianki w wodzie.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą.

Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry.

Nie stosować, jeśli nastąpiło uszkodzenie mechaniczne wyrobu (np. pęknięcie, rozerwanie).

OSTRZEŻENIA

Przed użyciem skonsultować celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania z lekarzem lub specjalistą rehabilitantem.

Nie wystawiać produktu na działanie otwartego płomienia lub innych źródeł ognia mogących wywołać zapłon. Pianka wystawiona na działanie otwartego ognia gwałtownie się zapala.

Nie wystawiać produktu na długotrwałe działanie niskich temperatur (poniżej 5°C).

Opakowanie wyrobu nie jest zabawką.

Nie wystawiać produktu na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ pod wpływem nasłonecznienia może ulec przebarwieniu. Przebarwienie pianki nie wpływa na jej właściwości fizyczno-mechaniczne produktu.

Wytrzymałość taśmy rzep została określona w teście zrywania i wynosi 3000 cykli.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

GWARANCJA

Producent zapewnia klientowi, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.

Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).

Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

Glosariusz symboli

 Producent	 Kod partii	 Oznakowanie CE	 Chronić przed wilgocią
 Numer katalogowy	 Wyrób medyczny	 Najniższa dopuszczalna temperatura	 Przechowywać z dala od światła słonecznego
 Zajrzyj do instrukcji używania	 Data produkcji	 Ostrzeżenie	 Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone
 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	 Ilość	 Dbaj o czystość	

Data wydania instrukcji używania: 11.2024 v.3



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Polska
www.rehafund.pl

I/PL/AD-1/2/19.01.2024