

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  
NASADKA TOALETOWA SARA 870****PRZEZNACZENIE**

Nasadka toaletowa służy do zwiększenia wysokości toalety do poziomu najbardziej komfortowego dla użytkownika. Dzięki temu łatwiej jest usiąść i wstać. Przeznaczona jest dla wszystkich osób, którym kłopot sprawia przemieszczanie się i tradycyjne korzystanie z toalety, np. pacjenci po operacji biodra lub urazie, seniorzy.

MODELE		
Nr katalogowy	RF-870/10	RF-870/15
Max. bezpieczne obciążenie	100 kg	100 kg
Wysokość	100 mm	150 mm
Długość	390 mm	390 mm
Szerokość siedziska	360 mm	360 mm
Waga	1.4 kg	1.6 kg



**UWAGA!** Przed rozpoczęciem korzystania z nasadki należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

**ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Nasadka toaletowa nie jest przeznaczona do montażu na stałe. Należy ją poluzować i dokręcić raz w tygodniu, aby zapewnić właściwe dopasowanie.
2. Powoli usiądź na nasadce zginając kolana, jeśli to możliwe zegnij biodra i kolana równocześnie.
3. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



**UWAGA!** Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.



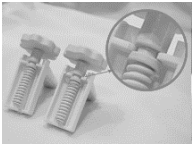


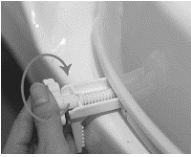
**UWAGA!** Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu ustalenia odpowiedniego sposobu korzystania z nasadki, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.



**UWAGA!** Poniższa informacja to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.

**MONTAŻ**

1. Poluzuj pokrętła do mocowania nasadki (rys.1).
2. Włóż je do nasadki i delikatnie wkręć pokrętło (rys. 2).
3. Zamontuj nasadkę na toalecie (rys. 3).
4. Dokręć pokrętło tak, aby nasadka była stabilnie przymocowana do toalety (rys. 4).

rys. 1	rys. 2
	
rys. 3	rys. 4
	

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę nasadki pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.
2. Zaleca się regularne czyszczenie nasadki miękką szmatką i wodą z mydłem. Nasadkę po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.
3. Nasadkę można zdemontować w celu wyczyszczenia odkręcając boczne pokrętko.



**UWAGA!** Do czyszczenia nasadki nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.













**UWAGA!** Regularnie sprawdzaj mocowanie nasadki, aby upewnić się, że jest bezpieczna.

### LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Cała konstrukcja	PE (polietylen)
------------------	-----------------

### WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie

**REHA FUND Sp. z o.o.**

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska  
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07  
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.2  
Wydano: 03/2021

**KARTA GWARANCYJNA  
NASADKA TOALETOWA SARA 870**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

**WARUNKI GWARANCJI**

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Siedzisko nasadki jest objęte 24 miesięcznym okresem gwarancji, pozostałe części objęte są 6 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że nasadka była wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
  - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją nasadki opisane w instrukcji użytkowania;
  - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
  - mechaniczne i termiczne uszkodzenia nasadki np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
  - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

**WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)**

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					

## NOTATKI