

# INSTRUKCJA UŻYWANIA

Poduszka do siedzenia SuperŻel



## PRZEZNACZENIE

Poduszka przeciwoodleżynowa do siedzenia Super Żel zalecana jest w profilaktyce przeciwoodleżynowej i w stanach po powstaniu odleżyn. Unikalny profil medyczny i otwarta struktura pianki umożliwia swobodne krążenie powietrza, rozprasza ciepło i wilgoć na skórze pacjenta. Wkład żelowy zapewnia doskonałą redystrybucję nacisku na szerokiej powierzchni, dzięki czemu znacznie redukuje nacisk na ciało. Dolna warstwa pianki rozprasza nacisk podłoża na ciało i stabilizuje poduszkę.

## CHARAKTERYSTYKA

Materac jest wykonany z nietoksycznej, pianki poliuretanowej. Materac występuje w trzech rozmiarach: 200 x 90 x 10 cm, 200 x 90 x 12 cm, 200 x 90 x 15 cm i dostępny jest w pokrowcu elastycznym nieprzemakalnym (REF-15/P/EN), bawełniano- poliestrowym (REF-15/P/B), nieprzemakalnym (REF-15/P/N) jak również w wersji bez pokrowca.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Poduszkę czyścić delikatną szmatką zamoczoną w cieplej wodzie z dodatkiem ragodnych środków do prania. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć. Nie namaczać carej pianki w wodzie. Pokrowiec można prać w 40 °C.

## PRZECIWWSKAZANIA

- Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą.
- Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry.
- Nie stosować, jeśli nastąpiło uszkodzenie mechaniczne wyrobu (np. pęknięcie, rozerwanie).
- Nie stosować inaczej niż zgodnie z przeznaczeniem.

## ⚠️ OSTRZEŻENIA

Przed użyciem skonsultować celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania z lekarzem lub specjalistą rehabilitantem.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Przed pierwszym użyciem należy wyprać pokrowiec.

Wyrób należy dobrać odpowiednio do rozmiaru ciała.

Nie wystawiać wyrobu na działanie otwartego płomienia lub innych źródeł ognia mogących wywołać zapłon.

Pianka wystawiona na działanie otwartego ognia gwałtownie się zapala.

Nie wystawiać wyrobu na długotrwałe działanie niskich temperatur (poniżej 5 °C).

Opakowanie wyrobu nie jest zabawką.

Nie wystawiać wyrobu na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ pod wpływem nasłonecznienia może ulec przebarwieniu. Przebarwienie pianki nie wpływa na jej właściwości fizyczno-mechaniczne produktu.

## GWARANCJA

Wyrób objęty jest 24-miesięcznym okresem gwarancji. Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania. Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych wskutek używania wyrobu niezgodnie z instrukcją używania, zaniedbań, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych. Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, nabywca będzie obciążony kosztami realizacji i reklamacji. Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu. Zasięg terytorialny ochrony gwarancji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

### Wyjaśnienie symboli

Producent	Data produkcji	Przechowywać z dala od światła słonecznego	Prasować w temperaturze maksymalnie 150 °C
Numer katalogowy	Oznakowanie CE	Najniższa dopuszczalna temperatura	Nie prasować
Zajrzyj do instrukcji używania	Ostrzeżenie	Prać w temperaturze max 60 °C	Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze
Kod partii	Dbaj o czystość	Prać w temperaturze max 90 °C	Odporność na suszenie 70 °C
Wyrób medyczny	Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone	Prać w temperaturze max 95 °C	Nie czyścić chemicznie
Numer modelu	Chronić przed wilgocią	Prać na sucho bez użycia rozpuszczalników	Nie wybielać

Data wydania instrukcji używania: 05.2024 v.3

15/P/EN					
15/P/B					
15/P/N					

**REHA FUND Sp. z o.o.**  
ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa, Polska  
www.rehafund.pl

I/PL/681/48/2/24.05.2024