

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Pokrowiec bawełniany elastyczny nieprzemakalny



PRZEZNACZENIE

Pokrowiec bawełniany elastyczny nieprzemakalny jest przeznaczony do zabezpieczenia powierzchni materaca podkładowego lub przeciwoślizgowego przed zabrudzeniem wydzielinami fizjologicznymi (np. krew, mocz).

CHARAKTERYSTYKA

Wykonany z nieprzemakalnego materiału: dzianiny bawełniano poliestrowej. Ten pokrowiec posiada wszyty suwak, który ułatwia właściwe założenie go na materac.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Pokrowiec prać w temperaturze do 60°C, delikatne pranie. Produkt zachowuje właściwości do ok. 30 prań środkami do prania. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą.

Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry.

Nie stosować, jeśli nastąpiło uszkodzenie mechaniczne wyrobu (np. pęknięcie, rozerwanie).

Nie stosować inaczej niż zgodnie z przeznaczeniem.

⚠ OSTRZEŻENIA

Przed użyciem skonsultować celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania z lekarzem lub specjalistą rehabilitantem.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Nie chlorować (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor).

Nie czyścić chemicznie.

Nie prasować (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer).

Stosować jednostronnie (pokrowiec należy skierować powierzchnią dzianinową do góry).

Nie suszyć w w suszarkach bębnowych.

Pogorszenie właściwości wizualno-estetycznych (typu zmarszczenie powierzchni) nie wpływa na zmianę parametrów użytkowych materiału (właściwości fizyko-mechanicznych).

Opakowanie wyrobu nie jest zabawką.

Wyjaśnienie symboli

Producent	Kod partii	Dbaj o czystość	Chronić przed wilgocią	Suszyć w pozycji poziomej
Numer katalogowy	Wyrób medyczny	Przechowywać z dala od światła słonecznego	Ostrzeżenie	Nie czyścić chemicznie
Zajrzyj do instrukcji używania	Oznakowanie CE	Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone	Prac w temperaturze max 60 °C	Nie wybielać
Data produkcji	# symbol"/> Numer modelu	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	Nie prasować	Nie prac w suszarce bębnowej

Data wydania instrukcji używania: 10.2024 v.1



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa, Polska
www.rehafund.pl

I/PL/15/P/BEN/1/08.10.2024